

TRAUMATRANSFER™ MINI

TRAUMAMADRASS

ORIGINALET



TraumaTransfer™ Mini är en innovation utvecklad och konstruerad av Anders Erlandsson och Eson Comfort. Detta är originalet som är det enda heltäckande konceptet för säker immobilisering och förflyttning av barntraumapatienter eller andra svårt sjuka patienter. Stor vikt har lagts vid att optimera funktion och användarvänlighet. TraumaTransfer™ Mini är speciellt utformad för barntrauma, 1 – 8 år.


- OPTIMERAD FÖR CT
- ENKLA OCH SÄKRA FÖRFLYTTNINGAR
- TRYCKAVLASTANDE



Tillbehör

Godkända och Certifierade

Samtliga innovationer och konstruktioner av **Anders Erlandsson** och **Eson Comfort**

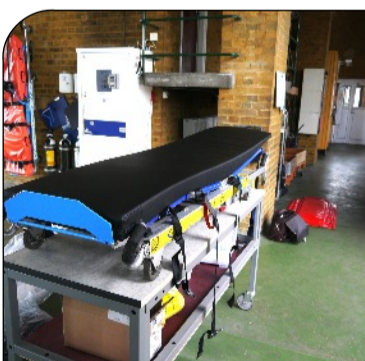

TT-Transporter™ - är en utjämningsmadrass som används på Alfa-bärar vid alla transporter med TraumaTransfer™ Mini.

BedSlide™ - flexibel glidskiva som används vid förflyttning eller lyft av patient.



Pelfix™ Bäckfixering – 2st smala och 2st breda kuddar per förpackning. Går att kombinera för olika storlekar. **Fixeringskuddar används ALLTID för en säker immobilisering på TraumaTransfer™ Mini**



AEROresc® - EASY Collar kombinerar det bästa från marknadsledarna. EASY Collar kan justeras till 16 olika storlekar, för optimal anpassning. Finns i Vuxen-, militär- och barnversion. Certifierad för användning med TraumaTransfer™.


ESON COMFORT
"WE INVENT THE FUTURE"
www.esoncomfort.se

Godkända och Certifierade engångslösningar för TraumaTransfer™

OBS! Vi avråder starkt från användning av andra icke godkända lösningar, då det finns bevisat osäkra och miljökadliga lösningar på flera svenska sjukhus, vars utseende är ganska snarlika våra original.



TT-Cover K-Light 2020™ Mini - Engångsöverdrag med separata huvudkuddar till TraumaTransfer™. Värmer patienten och skyddar madrassen. Reducerar tiden för rengöring.

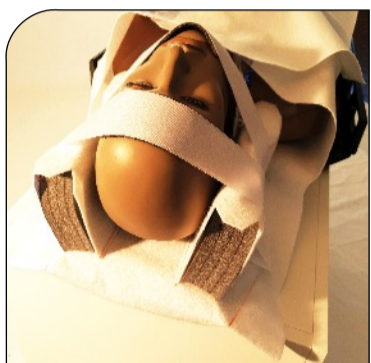

TT-Cover 2014™ Mini - Engångsöverdrag till TraumaTransfer™ Mini. Värmer patienten och skyddar madrassen. Integrerad huvudfixation förenklar handhavandet. Reducerar tiden för rengöring.



TT-Headfix K-Light 2020™ Mini - Immobiliseringslösning till TraumaTransfer™ Mini. Kompletterar TT-Cover K-Light 2020™, när inte heltäckande lösning efterfrågas.

Används vid lägprioriterat traumafall.



TT-Headfix 2014™ Mini - Patenterad immobiliseringslösning för TraumaTransfer™ Mini. Kompletterar TT-Cover 2014™ Mini, när inte heltäckande lösning efterfrågas.

Används vid lägprioriterat traumafall.

FRÅGOR OCH SVAR OM TRAUMATRANSFER™

1. Vilka är de största fördelarna med TraumaTransfer™?

Man slipper besvärliga och farliga förflyttningar på bl.a. röntgenavdelningar. Detta sparar tid och ökar patientsäkerheten. Tryckavlastande polstring minimerar risken för tryckskador.

2. Är TraumaTransfer™ endast till för multitraumapatienter?

Alla traumapatienter, alltså även lindrigt skadade som bedöms komma till CT eller annan röntgen, bör bli placerade på TraumaTransfer™. Även patienter med misstänkt intracerebral blödning kan med fördel placeras på TraumaTransfer™.

3. När och hur flyttar man över patienten till TraumaTransfer™?

TraumaTransfer™ är en intrahospital madrass som bör placeras på akutmottagningen, där överflyttning sker. Beroende på vad patienten ligger på vid ankomsten, kan olika tekniker användas:

- BedSlide™ eller förflyttningshjälpmiddel som lämpligen placeras under patienten i samband med log-roll-manövern. Detta är lämpligt bl.a. om patienten ligger på en vakuummadrass vid ankomst.
- Vissa prehospitla immobiliseringshjälpmedel kan placeras ovanpå TraumaTransfer™ men dessa bör snarast möjligt avlägsnas för att få optimal patienthantering.

4. Hur placeras och fixeras patienten på TraumaTransfer™?

En av följande lösningar monteras **ALLTID** på TraumaTransfer™, enligt manualen för TraumaTransfer™:

- TT-Cover 2014™ Mini eller TT-Cover K-Light 2020™ Mini för heltäckande lösning.
- TT-Headfix 2014™ Mini eller TT-Headfix K-Light 2020™ Mini när endast huvud och nacke immobiliseras.

Därefter flyttas patienten över och centreras på madrassen. Patienten skall placeras med huvudet i höjd med överkanten på TraumaTransfer™. Före transport t.ex. Till röntgen, fixeras patientens huvud och kropp. Detta för att säkerställa vidare förflyttningar.

5. Hur länge kan en patient ligga på madrassen utan risk för tryckskador?

Det beror på patientens kropps-konstitution och perifera cirkulation. Flera patienter har legat på TraumaTransfer™ i mer än 12 timmar, utan tecken på tryckskada. Grundregel är att inte låta patienten ligga kvar längre än vad allmäntillståndet kräver.

6. Hur rengör man TraumaTransfer™?

- A. Avlägsna alla lösa delar
- B. Kroppsbanden bör vid nedblodning spolras i kallt vatten. De kan därefter tvättas i 60°.
- C. Madrassen torkas av och desinficeras med sprit-tvällösning eller Virkon 1%. Undvik dusch och högtrycksrengöring!

PRODUKTINFORMATION

Madrassen är uppbyggd på en 12mm:s bärande esonkärna i kolfiberpolycell. Över kärnan ligger en 20mm tjock stoppning med fjädrande och viskoelastiska egenskaper, volymvikt av ca 52kg/m³. Över stoppningen ligger ett penetreringskydd i EVA. Överdraget är tillverkat av en tät Trevira CS-väv med sydda och vätsketätade sömmar, för att få starkast möjliga lösning. Väven har en draghållfasthet på mer än 2.500N/5cm. Översidan är försedd med den senaste Easy Of™ teknologin för optimala hygienegenskaper. TraumaTransfer™ har en lågfriktionsundersida för att förenkla förflyttningar. Utmed långsidorna finns en Esongrip™ grepplist i HD-Polyeten, utformad för optimal överflyttningsergonomi. Klarar cigarett- och antändningstest enligt svensk standard utan tillsättning av flamskyddsmedel. Produktionen sker utan användning av CFC. Konstruktionen ger inga artefakter. TraumaTransfer™ klarar kravet på minimal attenuering av röntgenstrålning.

TraumaTransfer™ Mini har måtten 440*1420*45mm och väger 6kg. TraumaTransfer™ Mini har en teknisk funktionsgaranti på 1 år.

Tillval/reservdelar

Fästband för kroppen, kryssfästband, fotband, BedSlide™ glidskiva, bäckenfixeringskudde TT-Pelfix™ mm.

Tvättråd

Madrassen tvättas med sprit-tvällösning eller Virkon 1%. Kroppsbanden kan maskintvättas i 60°.

TraumaTransfer™ är utvecklad och konstruerad av Anders Erlandsson, med stöd av traumagruppen på Länssjukhuset i Halmstad och den tillverkas i Sverige.

CE Registrationcode 344-2757-35332



ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com

Copyright 1999-2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved